



Webinaire ASTER

20 octobre 2022
Valère Ulenaers
valere.ulenaers@drweigert.be



Innovation en chimie

*il faut toujours quelqu'un, qui prends les devants,
pour découvrir de nouveaux chemins.*




Ingrédients des détergents

- Tensioactifs
- Enzymes
- Composants alcalin
- Agents complexants
- Conservateurs

Tensioactifs

- Non-ionique
- Anionique
- Cationique
- Amphotère

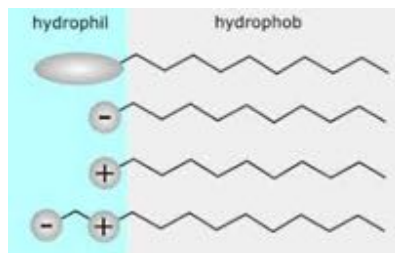



- Utilisation de solubilisant



Enzymes

Principe de la serrure à clé

- Catalyseur
- Différents types d'enzymes
- Influence température
- Influence pH

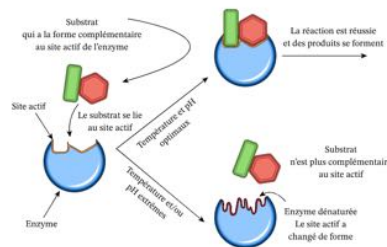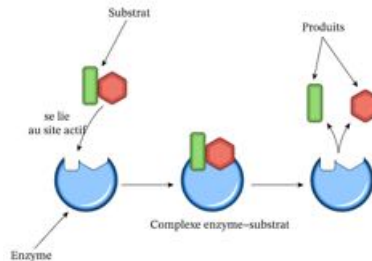

29/12/22

Dr. Weigert klassifiziert - Intern

5



Composants alcalins

pH > 9

- Hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium.
- Amines, carbonates, polyphosphates, silicates.
- Saponification, hydrolyse.
- Graisses, protéines, amidons.

29/12/22

Dr. Weigert klassifiziert - Intern

6



Agents complexants

- Ions métallique, cations
- Qualité d'eau, dureté
- Souillure
- Décomposition catalytique

29/12/22

Dr. Weigert klassifiziert - Intern

7



Conservateurs

Formulation aqueuse sans fonction biocide

- Durée de conservation
- Fortement réglementé
- Peu d'innovation
- Défi

29/12/22

Dr. Weigert klassifiziert - Intern

8



DR. WEIGERT
Hygiène mit System

neodisher® MediClean advanced

NEXT LEVEL

FORCE D'INNOVATION **POWER**

DÉVELOPPEMENT

ASTUCIEUX **PROGRÈS**

INTELLIGENT

29/12/22 Dr. Weigert klassifiziert - Intern 9

DR. WEIGERT
Hygiène mit System

neodisher MediClean advanced

neo disher

DR. WEIGERT
Hygiène avec système

Innovation produit 2021

neodisher MediClean advanced

Penser plus loin - Vivre dans le progrès.
© 2021 Dr. Weigert
neodisher MediClean advanced

29/12/22 Dr. Weigert klassifiziert - Intern 10



neodisher MediClean advanced

- Ultra-concentré monocomposant
- Testé avec tous les laveurs-désinfecteurs courants (Miele, Steelco, KEN, MMM, Belimed, Matachana...)
- Le passage rapide à neodisher MediClean advanced est possible pour tous les laveurs-désinfecteurs de nos marchés.
- Nous ne nécessitons pas de possibilité de dosage particulière
- C'est ce que nous appelons notre concept « Plug and Play »

29/12/22

Dr. Weigert klassifiziert - Intern

11



neodisher MediClean advanced

Avantages du produit

- Produit hors-pair qui se distingue des autres produits par ses propriétés exceptionnelles en matière de caractéristiques détergentes
 - Formulation unique
 - Élimine les biofilms
 - Répond aux recommandations RKI dans le cadres prions.
- et de compatibilité avec les matériaux, adapté pour le nettoyage en machine et manuel
 - des instruments de chirurgie mini-invasive et micro-invasive
 - Les instruments dentaires
 - Les instruments d'ophtalmology
 - Les instrument Robot, Da Vinci

29/12/22

Dr. Weigert klassifiziert - Intern

12



neodisher MediClean advanced


Avantages du produit

- Dr. Weigert offre avec neodisher MediClean advanced une nouvelle catégorie de traitement des instruments.
- Formulation moderne, leader en matière d'innovation.
- neodisher MediClean advanced peut être proposé comme alternative ... quand, par exemple, la qualité de l'eau n'est pas suffisante ou si les instruments présentent des dépôts.

29/12/22

Dr. Weigert klassifiziert - Intern

13

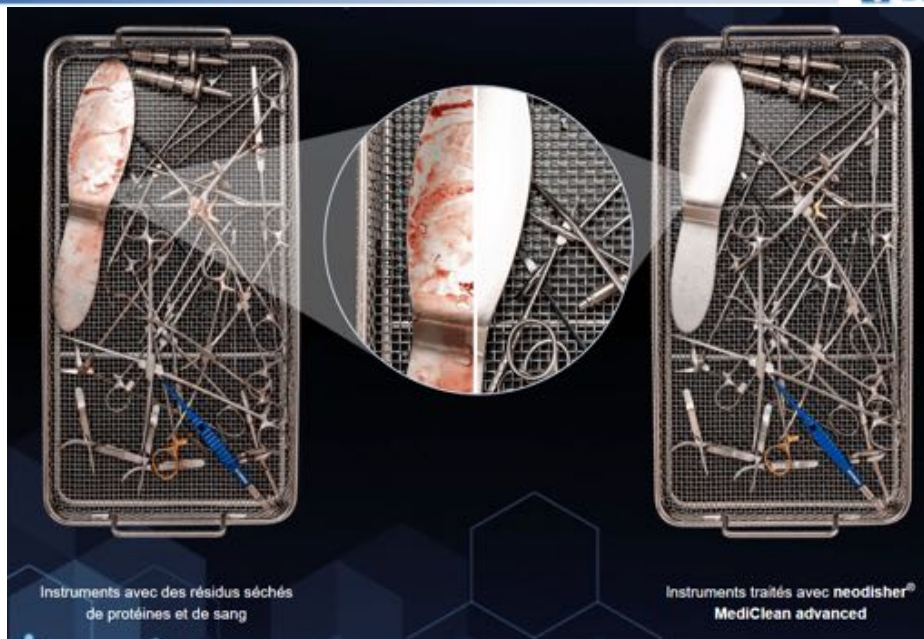

Instruments avec des résidus séchés
de protéines et de sang

Instruments traités avec neodisher[®]
MediClean advanced

29/12/22

Dr. Weigert klassifiziert - Intern

14



neodisher MediClean advanced

- Penser plus loin – Vivre le progrès...
- Nous vous souhaitons bonne chance dans votre test avec neodisher MediClean advanced !
- Vous avez des questions ?
- Nous serons ravis de recevoir vos commentaires !

